

UltraFrame-ihonsuojaliuska/reunateippi

Käyttöohje:



- 1) Poista suojapaperi nro 1.
- 2) Aseta ihonsuojaliuska paikoilleen.
- 3) Poista suojapaperi nro 2.
- 4) Tasoita osio paikoilleen ihoa vasten.



- 5) Poista suojapaperi nro 3.
- 6) Tasoita osio paikoilleen ihoa vasten.
- 7) Poista suojapaperi nro 4.
- 8) Poista viimeinen suojapaperi valkoisesta reunasta nostaen.

Liuskan poistaminen:



- 1) Valkoinen liuska reunassa helpottaa poistamista.
- 2) Venytä liuskaa.
- 3) Venytä hieman lisää. Huomioithan, että vedät liuskaa hitaasti ylöspäin kehon suuntaisesti (älä vedä liuskaa kohtisuoraan irti ihosta kuten laastaria).
- 4) Laita käytetty liuska roskiin.