


## ZenSetiv-silikonilaastari halkiolla

Hellävaraiseen kiinnitykseen ja suojaan potilaan parhaaksi

### Tuote

ZenSetiv-silikonilaastari halkiolla on itsekiinnittyvä sidos, jota voidaan käyttää kirurgisen avanteen ympärillä, jossa tarvitaan suojaa erilaisten lääketieteellisten tarvikkeiden, kuten katetrien, letkujen ja dreerien ympärille. Valmis halkio, tyyny imee itseensä mahdolliset eritteet. Ei ärsytä ihoa ja on helppo irrottaa. Kaksi kokoa: 7,5 x 7,5 cm sekä 10 x 10 cm.

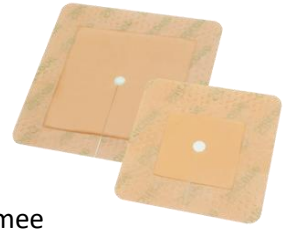

## Käyttökokemuksia:

Olen työskennellyt Peg-hoitajana 15 vuotta, jonka aikana olen käyttänyt potilaillani monenlaisia haavanhoitosidoksia. Seuraavat kokemukseni ZenSetiv – silikonilaastereista perustuvat yhteensä 50 potilaan hoitotuloksiin.

Neljän viikon kokeilujakson jälkeen ZenSetiv – laastarit osoittautuivat erinomaisiksi Peg-potilaiden hoidossa, ja mikä tärkeintä, potilaat itse olivat hyvin tyytyväisiä laastareihin. He pitivät erityisesti siitä, että laastarit ovat helppokäyttöisiä ja tuntuvat hyvältä iholle.

Olen ottanut ZenSetiv – laastarit osaksi päivittäisiä hoitorutiineja kaikille potilailleni. Peg – letkun vaihdon jälkeen, on letkun juurella käytettävä päivittäinen sidosta. Tarkoituksena on estää ihoärsytystä. ZenSetiv - silikonilaastarin tyyny imee gastroomakanavasta sekä sen ympäriltä tulevat eritteet. Pehmeä silikonigeeli kiinnittää laastarin iholle välittömästi ja suojaa ihoa.

Päivittäinen ihonhoito: avaa kiinnityslevyn suljin ja irrota levy gastroomakanavasta, vedä levyä ylöspäin, poista vanha sidos, puhdista iho letkun ympäriltä, puhdista levy molemmilta puolilta, laita pegin juureen uusi ZenSetiv-silikonilaastari, aseta levy takaisin ja vedä letkusta hellävaroen, jotta kevyt jännite muodostuu, kiinnitä letku levyyn ja sulje letkun kiinnike.

Ihon tulehtuessa, ZenSetiv – laastareiden kanssa on helppo käyttää erityisiä haavanhoidon tuotteita. Olen käyttänyt erilaisia bakteereja tuhoavia ja superimeviä tuotteita yhdessä ZenSetiv-laastareiden kanssa. Laastarit pitävät nämä erikoistuotteet erinomaisesti paikoillaan ja näin parantavat niiden tehoa. Ihon parannuttua, potilaalla voidaan jatkaa pelkän ZenSetiv-silikonilaastarin käyttöä.

Kokemukseni mukaan ZenSetiv – silikonilaastarit ovat:

- helppoja asettaa valmiin halkion ansiosta
- kiinnittyvät nopeasti
- ihoystävällisiä
- imevät eritettä
- parantavat haavanhoitotuotteiden tehoa
- helppoja ja kivuttomia poistaa.

*Pia Riipinen*

*Apulaisosastonhoitaja, YAMK, EAT*

*Asiantuntijasairaanhoitaja, Kliinisen hoitotyön erityispätevyys*

*Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Kirurgian poliklinikka*

Lisätiedot ja näytepyynnöt:

puh. 0800 940 60 / asiakaspalvelu@medfanet.fi

Medfanet Oy, Linnoitustie 4 B, 02600 Espoo